



A.M.I. TVA Sling / TOA Sling

- Kadınlarda ürener stress inkontinens tedavisi için
- Hastaya özel post-op dönemde ayarlama için ön yerleşimli aşağı yukarı çekme suturları
- Sling gergi ayarı post-op dönemde birkaç gün içinde mümkündür

TVA(Trans Vajinal Ayarlanabilir) / TOA (Trans Obturator Ayarlanabilir) Sling İmplantları TVT/TOT ameliyatlarında kullanılma amaçlıdır.

Sling implantasyonunda, hastaya özel doğru yerleşim için ileri derecede cerrahi tecrübeye gerek yoktur.

TVA/TOA Sling de önceden yerleştirilmiş 8 adet suture bulunur. Bütün suturelar kapanmış dilt ve vajina dan dışarı çıkar.

İmplantın gerginliği post-op dönemde 5 gün içerisinde kolayca ayarlanabilir.

- Yukarı doğru idrar kesesi dolu ve hasta ayaktaiken
- Aşağı doğru hasta supine pozisyondayken sling gerginlik ayarı yapıldıktan sonra monofilament suturelar basitçe çekilerek çıkarılır.
- Kolay ve daha az travmatik yerleşim için TVA/TOA Sling PE bir kılıf içindedir.
- Monofilament Polypropylene ayar sutureları kolay çıkartıma izin verir.
- Monofilament Polypropylene mesh uzunluğu boyunca yumuşak ve sağlamdır
- Meshin iri gözenekleri doku entegrasyonu ve enfeksiyon riskini azaltılması için idealdir

Ürün Kodu:	A.M.I. TVA Sling ve Balon	Teknik detay
TVA5021 	Transvajinal yaklaşım için Mesh Sling post-op ayarlama için 8 adet suture içerir Aşağı ve yukarı ayarlama müm kündür 1 adet TVA Mesh Sling 1 adet Vajinal Balon Kullanım Kılavuzu Hasta Kod Etiketi	Kenar başına suture adedi: 3 yukarı (100/120/140mm) 1 aşağı(20m m) Sling ve suturelar Pe folyo ile kaplıdır Sling uzunluğu 450mm Vajinal balon tampon olarak kullanılır Steril ambalajdadır
TVA5030 	Transvajinal ve retropubic yaklaşım için çelik enstruman 1 adet TVA tünel açıcı Kullanım Klavuzu	Enstruman uzunluğu yaklaşık 290mm Steril değildir Otoklavlanabilir
TOA5121 	Transobturator yaklaşım için Mesh Sling post-op ayarlama için 8 adet suture içerir Aşağı ve yukarı ayarlama müm kündür 1 adet TOA Mesh Sling 1 adet Vajinal Balon Kullanım Kılavuzu Hasta Kod Etiketi	Kenar başına suture adedi: 3 yukarı (70/90/110m m) 1 aşağı(20m m) Sling ve suturelar Pe folyo ile kaplıdır Sling uzunluğu 450mm Vajinal balon tampon olarak kullanılır Steril ambalajdadır
TOA5130 	Transvajinal ve Transobturator yaklaşım için çelik enstruman 2 adet TOA tünel açıcı (sağ ve sol) Kullanım Klavuzu	Enstruman uzunluğu yaklaşık 245mm Steril değildir Otoklavlanabilir